



(Seringue safePICO sans aiguille)



Enlever la seringue  
du sachet **et monter  
l'aiguille**

**Avant le prélèvement :**  
**Pré-positionner** le  
piston au volume de **1  
mL**

1



**Prélever au  
minimum 1mL** avec  
le piston positionné  
vers le haut :  
la pression artérielle  
remplit la seringue

2



**Après le  
prélèvement :**  
**Enlever l'aiguille** de  
manière sécurisée

**Bien enfoncer le  
bouchon** et tourner  
d'un quart de tour

3



**Tapoter le corps de  
la seringue** pour  
libérer les bulles  
d'air (seringue  
verticale)


4



**Purger les bulles  
d'air** jusqu'à remplir  
entièrement le  
bouchon de sang

Exercer une pression  
lente sur le piston  
jusqu'à la butée

5

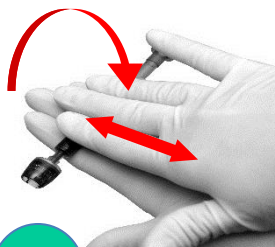

**Agiter la seringue**  
pendant **au moins  
20 secondes** dans  
les deux axes pour  
dissoudre l'héparine

**Identifier la  
seringue avec  
l'étiquette patient**

6